

Ferticare 2.0

by Reflexonic



www.UrologyHealthStore.com

Reflexonic, LLC
44055 Riverside Pkwy. Suite 208
Leesburg, VA 20176

Weitere Informationen oder Ersatzteile erhalten Sie bei:
 medesign I. C. GmbH, Dietramszeller Straße 6, 83623 Dietramszell
Tel. 08027/90738-0

Ferticare 2.0

by Reflexonic

USER'S GUIDE

Ferticare 2.0

by Reflexonic

Manufactured for:

Reflexonic, LLC

44055 Riverside Pkwy. Suite 208

Leesburg, VA 20176

Phone: +1 301.378.8433

Fax: + 1 800.886.1470

Email: Customerservice@UrologyHealthStore.com

www.UrologyHealthStore.com



Rev. 4

Ferticare 2.0

by Reflexonic



Kundenservice:Customerservice@urologyhealthstore.com

(empfohlene und effizienteste Methode)

Tel: 1.301.378.8433 9:00 am – 3:00 pm, M-F US-Eastern time

Gebührenfreies Fax: 800.886.1470

Reflexonic, LLCInnovative Urological Solutions
44055 Riverside Pkwy. Suite 208
Leesburg VA, 20176 **Warnung**

Die Anwendung dieser Anweisungen erfolgt auf eigene Gefahr.
Führen Sie Ferticare 2.0 nicht durch, wenn Sie Wunden oder Risse an
Ihrem Penis haben.

Einführung	3
Vorsicht	4
Garantie	5
Symboltabelle	6
Batterie	7
Betriebsanleitung	8-9
Gebrauchsanweisung	10
Reinigung	11
Ferticare2.0 ® Product Specifications	12
Kundendienst und Kontaktinformationen	13

**BITTE LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG VOLLSTÄNDIG
DURCH, UM EINE KORREKTE ANWENDUNG UND OPTIMALE
ERGEBNISSE ZU ERZIELEN.**

FERTICARE 2.0® ist ein therapeutischer Vibrator.

Vibrationsstimulation des Penis zur Auslösung der Ejakulation in einem einfachen, nicht-invasives Verfahren, das sowohl in der Klinik als auch zu Hause durchgeführt werden kann. Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen und Anweisungen, die befolgt werden müssen, um eine sichere Anwendung des

FERTICARE 2.0® zu gewährleisten

-> Dieses Benutzerhandbuch enthält auch Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen, die unbedingt beachtet werden müssen.

Das Ferticare 2.0 besteht aus den folgenden Teilen:

- ▶ (1) Ferticare 2.0 Gerät
- ▶ Zwei Applikator-Pads
- ▶ Stromversorgung - AC/DC-Netzteil Ladegerät
- ▶ Komfortable Tragetasche
- ▶ Bedienungsanleitung
- ▶ Ein Jahr Herstellergarantie (**nur für Erstkäufer erhältlich**)

Frequenzbereich	70 - 110 Hz
Amplitudenbereich CSpitze-Spitze)	0.5mm – 4.0mm
Batteriekapazität Cbei 100 Hz und 2,5 mm)	Min. 20 minutes
Batterie	Lithium-Ion, 3x3.7V/0.75Ah 11.1V
Netzgerät, Hauptspannung	Input AC 100-240C ~ 50/60Hz Output: 12-12.6 V – 1A

Die Verwendung dieses Geräts sollte unter folgenden Bedingungen erfolgen:

Temperaturen zwischen:	+50°F +104°F (10°C + 40°C)
Eine relative Luftfeuchtigkeit von	max 85 %

Transportieren und lagern Sie dieses Gerät bei:

Temperaturen zwischen	-13°F+158°F (-25°C-+70°C)
Eine relative Luftfeuchtigkeit von	max 85 %

Um sicherzustellen, dass Ihr FERTICARE2.0® immer einsatzbereit ist, wird empfohlen, den Applikator nach jeder Anwendung zu reinigen.

Persönlicher Gebrauch

Um das Applikatorpad zu reinigen, ziehen Sie den abnehmbaren Applikator vom Vibrator ab (ziehen Sie den Applikator einfach in die Richtung, die direkt vom Körper des Geräts wegführt) und waschen Sie ihn in warmer Seifenlauge, Alkohol oder Desinfektionsmittel.

Um das Gerät zu reinigen, können Sie die Außenseite des Vibrators mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch abwischen.

Nicht den Vibrator in irgendeine Art von Flüssigkeit eintauchen und reinigen Sie ihn nicht mit Reinigungsalkohol.

Die so gekennzeichneten Angaben stellen Anweisungen dar, die stets befolgt werden müssen. Holen Sie sich vor der Verwendung dieses Geräts den Rat Ihres Arztes ein, wenn Sie irgendwelche Bedenken haben.

Autonomie-Dysreflexie (Blutdruckanstieg, Schweißausbrüche, Kopfschmerzen) kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z. B. einen überdehnten Darm oder eine überdehnte Harnblase. Verfahren, bei denen ein Orgasmus ausgelöst wird oder die eine Vibrationsstimulation beinhalten, können eine akute Episode der autonomen Dysreflexie auslösen. Wenn der Benutzer eine Rückenmarksläsion oberhalb der T6-Ebene hat, sollte der Benutzer sorgfältige Anweisungen von seinem Arzt bezüglich der autonomen Dysreflexie, ihrer möglichen Folgen und der Frage einholen, ob die Vibrationsstimulation eine akzeptable Behandlungsform darstellt.

Wenn bei dem Benutzer das Risiko einer autonomen Dysreflexie besteht, wird empfohlen, 10-15 Minuten vor Beginn der Vibration Nifedipin (ein Kalziumkanalblocker) in einer Dosierung von 10-20 mg oral einzunehmen und die Vibration bei Einsetzen der Ejakulation sofort zu beenden.

⚠ Warnung

Wenn der Benutzer nach der Verwendung des Ferticare 2.0-Geräts eine Peniserektion entwickelt, die länger als vier Stunden anhält, sollten Sie sofort Ihren Arzt aufsuchen oder sich in die Notaufnahme begeben, da der Benutzer möglicherweise einen Priapismus entwickelt hat, der einen medizinischen Notfall darstellt. Priapismus ist ein medizinischer Zustand, bei dem sauerstoffarme rote Blutkörperchen in Ihrem Penis eingeschlossen werden. Dies erfordert eine dringende medizinische oder chirurgische Behandlung.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

Der Hersteller gewährt für FERTICARE 2.0® eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum auf mechanische und elektrische Fehler, die auf fehlerhafte Teile und/oder Verarbeitung zurückzuführen sind. Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Unfälle, Manipulationen (einschließlich des Entferns des Secure-1D-Aufklebers) oder Veränderungen des Produkts in irgendeiner Weise oder durch unsachgemäße Handhabung, Reinigung oder Missbrauch des Produkts oder durch Nichtbeachtung der Anweisungen im Benutzerhandbuch verursacht wurden. Die Haftung des Herstellers beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz eines defekten Produkts nach seiner Wahl.

Das Entfernen des Secure-1D-Aufklebers ist so konzipiert, dass er sofort nach dem Ablösen von der aufgetragenen Oberfläche Anzeichen für eine Manipulation aufweist – durch das Entfernen des Aufklebers erlischt automatisch jegliche Garantie.

Reflexonic, LLC ist nicht haftbar für zufällige oder Folgeschäden, ob direkt oder indirekt.

Ferticare 2.0 kann nicht zurückgegeben oder erstattet werden.

Es wird empfohlen, die Vibration mit der niedrigsten Einstellung von 70 Hz Frequenz und der Standardeinstellung von 2,5 mm Amplitude zu starten.

Stellen Sie sich bequem hin, bevor Sie **FERTICARE 2.0®** einschalten. Legen Sie den Applikator wie abgebildet auf:



Am Frenulum oder Dorsum Ihres Penis und üben Sie nur so viel Druck aus, wie Sie als angenehm empfinden. Wenn das Applikator-Pad aufhört zu vibrieren, wird empfohlen, den Druck zu verringern. Wenn Sie weiterhin mehr Druck als empfohlen ausüben, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, wird die Vibrationsleistung auf weniger als die gewählte Einstellung abnehmen. Wenn Sie schließlich mehr Druck ausüben, hört die Vibration auf.

Batterie

Ferticare 2.0
by Reflexonic

Die Batterie in unserem

FERTICARE 2.0® wurde nicht vor dem Versand aufgeladen.

Es wird empfohlen, das Gerät vor dem ersten Gebrauch mindestens 10 Stunden vollständig aufzuladen.



Es wird empfohlen, das Gerät nach 20 Minuten Nutzung mindestens 10 Stunden lang aufzuladen



Um sicherzustellen, dass Ihr FERTICARE 2.0 immer einsatzbereit ist, wird empfohlen, den Akku durchschnittlich alle 20 Minuten aufzuladen. Ein voll aufgeladener Akku ermöglicht 20 – 30 Minuten Vibrationsleistung bei einer Amplitude von 2,5 mm und einer Frequenz von 100 Hz. Wenn das FERTICARE 2.0® zum Aufladen eingesteckt ist, kann es nicht eingeschaltet werden. Dies ist eine Schutzfunktion.

Wenn das Gerät nicht regelmäßig benutzt wird: Um die optimale Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten wird empfohlen den Akku einmal im Monat vollständig zu entladen und wieder aufzuladen. Es wird eine Mindestladezeit von 10 Stunden empfohlen.

Entsorgung der Batterie

Die wiederaufladbare Batterie im Vibrator ist eine Lithium-Ionen-Batterie. Wie andere Akkus dieses Typs kann er bei Verbrennung oder Durchstich giftiges Material freisetzen, das Verletzungen verursachen kann.

Die Batterie kann vom Endbenutzer nicht aus dem Vibrator entfernt oder getauscht werden. Wenn Sie das Gerät entsorgen möchten, zerlegen Sie die Komponenten nicht. Entsorgen Sie es als Ganzes.

Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden für Abfallwirtschaft über die Möglichkeiten des Recyclings und der ordnungsgemäßen Entsorgung.

BEDIENUNGSANWEISUNGEN-1

Ferticare 2.0
by Reflexonic

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH

WARNUNG

Dieses Gerät sollte nicht auf geschwollenen oder entzündeten Stellen oder Hautausbrüchen verwendet werden. Tauchen Sie den Vibrator nicht in Flüssigkeiten jeglicher Art ein. Betreiben Sie den Vibrator nicht in Badezimmern oder anderen feuchten Umgebungen.

EIN/AUS & FREQUENZSTEUERUNG Referenzbild auf Seite 9

Das Gerät kann durch Drehen des Knopfes vom Körper weg eingeschaltet werden, wodurch sich die Frequenz in 10-Hz-Schritten erhöht. Die Frequenz kann auf einen beliebigen Wert zwischen 70 und 110 Hz eingestellt werden. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Drehknopf in Richtung Körper in die Position OFF drehen. **Es wird empfohlen, das Gerät mit einer niedrigen Amplitude einzuschalten. Erhöhen Sie die Amplitude auf den gewünschten Pegel, sobald das Gerät eingeschaltet ist.**

STATUSANZEIGE

Wenn der Vibrator eingeschaltet ist, leuchtet ein grünes Licht auf.

- ▶ Ladegerät eingesteckt und mit Strom versorgt – LED Grün
- ▶ Bitte beachten Sie, dass ein grüner Adapter und eine grüne Statusanzeige nicht bedeuten, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.

LADUNGSVERBINDUNG

Der Akku kann an diesem mit "Charge IN" gekennzeichneten Anschluss mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil aufgeladen werden. Beim Aufladen des Akkus leuchtet ein rotes Licht auf dem Gerät und wird grün, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.