

MUNDKEIL

Keilförmig soft transparent

90 x 35 mm

Der medesign Mundkeil ermöglicht verlässlich das Offenhalten des Mundes bei krampfenden Patienten (z. B. bei künstlicher Beatmung oder epileptischen Anfällen). Er verhindert wirkungsvoll das Zubeißen der Kiefer und damit verbundene Verletzungen an Mundhöhle und Zähnen.

Anwendung: Der Mundkeil wird zwischen Ober- und Unterkiefer geschoben, bis der Kiefer weit genug geöffnet ist.

Reinigung: Mit Seifenlauge, Alkohol oder Wasser reinigen. medesign Mundkeile nur in gereinigtem Zustand verwenden, um Infektionen vorzubeugen.

Mehrmalige Anwendung bei einem Patienten.



Krampfende Patienten können Silikonteile herausbeißen und eventuell verschlucken oder einatmen. Vor Verwendung auf Unversehrtheit prüfen.



REF MED1001087

LOT 698042

2027-04

UDI



UDI-DI (01) 04250201206145

(17) 270430

LOT (10) 698042

SRN DE-MF-000020677



MEDESIGN

PR N21321 SP02589.003 LOT 698581



4