



Pessar Anpass-Set



Gebrauchsanweisung



Made in Germany

M E D E S  G N
Dietramszell · Dubai · München

Pessar Anpass-Set

Ein Pessar Anpass-Set besteht aus einer Auswahl der wichtigsten Größen einer Pessarsorte.

Die Pessare sind aus einem speziell für den medizinischen Gebrauch entwickelten, flexiblen und gewebefreundlichen Silikon hergestellt.



Die Pessare eines Anpass-Sets sind ausschließlich zur Größenbestimmung bei der Patientin zugelassen. Die richtige Größe wird ausgewählt und das Pessar anschließend wieder entfernt, gereinigt und sterilisiert.

Bestimmung der richtigen Pessargröße

medesign Produkte werden grundsätzlich unsteril geliefert und sind vor dem erstmaligen Gebrauch entsprechend der Wiederaufbereitungsanleitung für sterilisierbare Silikonprodukte zu reinigen und zu sterilisieren.

Das Pessar sollte in der kleinsten Größe gewählt werden, welche auch beim Husten und Pressen noch gut im Scheidengewölbe haftet.

Verwenden Sie ein Gleitgel (z.B. Ladysoft), damit sich das Pessar leichter einführen lässt. Drücken Sie das Pessar für das Einführen zusammen. In der vorgesehenen Position sitzt das Pessar richtig, wenn es nicht drückt.

Nach dem Einlegen sollte die Patientin zum Test einige Male husten, pressen und sich bewegen. Kontrollieren Sie danach, ob das Pessar noch optimal sitzt.

Zum Entfernen des Pessars benetzen Sie den Scheidenbereich mit Gleitgel (z.B. Ladysoft).



Reinigung des Pessar Anpass-Sets
Entsprechend Wiederaufbereitungsanleitung
für sterilisierbare Silikonprodukte.

Pessar Anpass-Set	Größen	Artikel-Nr.	EAN
Cramer-Pessar	Ø 60, 65, 70, 75	MED1001770	4250201208521
Ring-Pessar (dünn)	Ø 65, 70, 75, 80	MED1000489	4250201202581
Ring-Pessar (dick)	Ø 65, 70, 75, 80	MED1001834	4250201209313
Siebschalen-Pessar	Ø 65, 70, 75, 80	MED1000656	4250201201492
Siebschalen-Pessar EF	Ø 65, 70, 75, 80	MED1001835	4250201209320
T-Pessar Typ B	Ø 25, 32, 36, 42	MED1001733	4250201208071
T-Pessar Typ R	Ø 25, 32, 36, 42	MED1001732	4250201208064
Urethra-Pessar	Ø 65, 70, 75, 80	MED1000765	4250201201621
Urethra-Schalen-Pessar	Ø 65, 70, 75, 80	MED1000488	4250201201706
Würfel-Pessar	Gr. 1, 2, 3, 4	MED1000487	4250201201874

Material: Silikon Grün

Inhalt:

- 4 Pessare (unsteril) mit Gebrauchsanweisung
- 1 Ladysoft Gleitgel mit Gebrauchsanweisung

Haben Sie noch Fragen zur Anwendung oder möchten uns Ihre Erfahrungen mitteilen, so schreiben Sie uns.



Verwendbar bis



Artikelnummer (MED...)



Chargenbezeichnung



Achtung



Herstellungsdatum



Gebrauchsanweisung beachten



Hersteller



CE-Zeichen mit Identifikationsnummer der benannten Stelle