

RETTUNGSDECKE

ca. 80 cm × 100 cm Silber-Silber

Als Schutz für den Transport von Babys und Kleinkindern

*Die silberne Thermodecke reflektiert die Körperwärme
und verhindert so eine Unterkühlung.*

Breiten Sie die Thermodecke aus und legen Sie das Baby oder Kleinkind in Seitenlage darauf. Wickeln Sie dann das Kind in die Decke ein und fixieren Sie die Rettungsdecke eventuell mit Klebeband.



Achten Sie darauf, dass das Gesicht frei bleibt.

UDI



UDI-DI

(01) 04250201206350



LOT

(17) 280630

(10) 696759-1



REF

MED1 0001 36

2028-06

LOT 696759-1

2028-06

Verpackung:



MEDESIGN



PRN21067 SP01198.005 LOT704048



4



medesign I.C. GmbH · Dietramszeller Str. 6 · D-83623 Dietramszell
www.medesign.de · info@medesign.de