

RETTUNGSDECKE

ca. 160 cm × 210 cm Gold-Silber

Hitze- und Kälteschutz

Kälteschutz: Die Decke mit der Silberseite zum Körper anlegen.

Hitzeschutz: Goldseite zum Körper, Decke lose überspannen.

Die Rettungsschutzdecke sollte immer nur lose umgelegt werden und nicht eng am Körper anliegen. So vermeiden Sie bei Hitze das Schwitzen und bei Kälte die bei direktem Hautkontakt mögliche Ableitung der körpereigenen Wärme. Die Rettungsdecke kann nötigenfalls mit Klebeband fixiert werden.



Achten Sie darauf, dass das Gesicht frei bleibt.

UDI



UDI-DI

(01) 04250201202567



(17) 301030

LOT

(10) 704257



REF

MEDE1000132

2030-10

LOT 704257

Verpackung:



SRN

DE-MF-000020677



MEDESIGN

PRN21104 SP00658.008 LOT704260



4



medesign I.C. GmbH · Dietramszeller Str. 6 · D-83623 Dietramszell
www.medesign.de · info@medesign.de