

Spermix

Für die Insemination Seminal Collection Device

1 Stück einzeln verpackt
1 piece single packed

Spezialkondom zum Auf-
fangen von Spermien für die
Insemination. Frei von Latex.

Medical condom for recovery of
semen for treatment in fertility.
Latex-free.



Made in Germany



SRN DE-MF000020677



REF MED1002539-B

LOT 704629

2030-09



MEDESIGN

UDI



LOT

(10) 704629



(17) 300930

UDI-DI

(01) 04250201219770

PRN21328 SP00008.000 LOT704630



4 250201 219770



medesign I.C. GmbH · Dietramszeller Str. 6 · D-83623 Dietramszell
www.medesign.de · info@medesign.de

Spermix Privat

Gebrauchsanweisung

Vor Gebrauch des Spermix Privat Spezialkondoms sollte der Genitalbereich gründlich gereinigt werden (z.B. mit der Femsoft Intim Waschlotion). Spermix Privat wird wie ein normales Kondom verwendet. Beim Geschlechtsverkehr spüren Sie keinen Unterschied, wenn Sie zusätzlich Ladysoft Gleitgel auf die Außenseite des Kondoms geben. Streifen Sie das Kondom nach der Ejakulation vorsichtig ab, sodass das Sperma im vorderen Teil des Spermix Privat verbleibt. Verschließen Sie nun das Kondom mit dem beigefügten Clip so gut, dass ein Auslaufen nicht mehr möglich ist. Geben Sie das Kondom zurück in die kleine verschließbare Plastiktüte. Schreiben Sie die Uhrzeit, das Datum, den Namen des/der Patienten/Patientin und den Namen der ärztlichen Fachperson oder Laboratoriums auf. Um ein optimales Resultat zu erzielen, sollten Sie die Samenprobe baldmöglichst zur Untersuchung oder Insemination bringen.

Wichtig:

Um negative Temperatureinflüsse zu vermeiden, sollte die Probe bei Körpertemperatur transportiert werden, z.B. direkt auf der Haut im BH oder Slip.

