

Viberect pro

Gebrauchsanweisung



MEDESIGN

Viberect pro

Inhaltsverzeichnis:

1. Verwendungszweck
2. Einleitung
3. Garantie
4. Batterie
5. Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise für den sicheren Gebrauch
6. Betriebsanleitung
7. Anleitung zum Herbeiführen einer Peniserektion
8. Abnehmen und Austauschen der Viberect Pro Soft Pads
9. Reinigung
10. Angaben zur elektromagnetischen Emission
11. Produktspezifikationen
12. Kontaktinformation
13. Symbollegende
14. Häufig gestellte Fragen

Viberect pro

1. Verwendungszweck

Viberect zur vibrierenden Stimulation des Penis ist ein tragbares Gerät, das Erektionen bei Männern hervorrufen kann.

2. Einleitung

Die Vibrationsstimulation des Penis ist eine einfache und nicht-invasive Stimulationsmethode, die ähnlich wie Geschlechtsverkehr oder manuelle Stimulation Lust und Genuss bringt.

Der Viberect Pro kann auch von Patienten mit Rückenmarksverletzungen oder Spastiken zur Luststeigerung verwendet werden.

Diese Gebrauchsanweisung enthält Informationen und Anweisungen, die befolgt werden müssen, um einen sicheren Betrieb des Viberect Pro Geräts zu gewährleisten. Diese Gebrauchsanweisung enthält auch Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen, die jederzeit beachtet werden müssen.



Alle Angaben in dieser Gebrauchsanweisung sollten stets befolgt werden. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung sorgfältig durch.

3. Garantie

Der Hersteller gewährt dem Viberect Pro Gerät eine Garantie von 6 Monaten ab dem Kaufdatum des Erstkäufers auf mechanische und elektrische Fehler, die auf fehlerhafte Teile und/oder Verarbeitung zurückzuführen sind.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Unfälle, Manipulationen oder Veränderungen des Produkts in irgendeiner Weise oder durch unsachgemäße Handhabung, Reinigung oder Missbrauch des Produkts oder durch Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung verursacht wurden. Die Haftung des Herstellers ist auf den Ersatz eines defekten Produkts beschränkt. Die Firma medesign I. C. GmbH haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden.

Viberec pro

4. Batterie

Die Batterie in Ihrem Viberec Pro Gerät wurde vor der Auslieferung aufgeladen.

Wenn das Gerät zum Laden eingesteckt und ausgeschaltet ist, leuchtet nur die Ladestatusanzeige. Diese Leuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot und wird grün, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, während es eingesteckt ist, beginnen die Frequenzanzeigeleuchten nacheinander zu leuchten. Dies zeigt an, dass das Gerät gerade aufgeladen wird. Das Gerät kann nicht benutzt werden, während es zum Aufladen eingesteckt ist. Wenn das USB-Kabel entfernt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Ein vollständig entladener Akku benötigt etwa 6-8 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden. Die rote Ladeanzeige wechselt zu Grün, sobald der Ladezyklus abgeschlossen ist.

Um sicherzustellen, dass Ihr Viberec Pro immer einsatzbereit ist, wird empfohlen, den Akku nach dem Gebrauch aufzuladen.

Es wird empfohlen, das Gerät mindestens einmal im Monat aufzuladen und zu betreiben, um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten.

Ein voll aufgeladener Akku ermöglicht etwa 30 Minuten Vibration bei mittlerer Frequenzeinstellung. Wenn das Gerät 30 Sekunden lang nicht benutzt wird, während es eingeschaltet ist, schaltet es sich automatisch ab, um die Batterie zu schonen.

Wenn sich das Gerät während des Gebrauchs selbst zurücksetzt, bedeutet dies, dass die aktuelle Akkuladung nicht ausreicht, um die erforderliche Leistung zu erbringen. Das Gerät kann normal verwendet werden, nachdem es eingesteckt und ordnungsgemäß aufgeladen wurde.

Bei völliger Entladung 6-8 Stunden aufladen.

Entsorgung der Batterie

Der wiederaufladbare Akku des Vibrators ist ein Lithium-Ionen-Akku.

Wie bei anderen Batterien dieses Typs können bei Verbrennung oder Durchstich giftige Stoffe freigesetzt werden, die Verletzungen verursachen können.

Wenn Sie das Gerät entsorgen möchten, nehmen Sie den Akku heraus. Entsorgen Sie den Akku sachgerecht bei kommunalen Sammelstellen oder schicken Sie den Akku an uns zurück und wir übernehmen für Sie die Entsorgung: medesign I. C. GmbH, Dietramszeller Straße 6, D-83623 Dietramszell.



Warnung

Änderungen an diesem Gerät sind nicht zulässig. Wenn dieses Gerät verändert wird, müssen entsprechende Inspektionen und Tests durchgeführt werden, um die sichere Verwendung des Geräts zu gewährleisten.

Viberec pro

5. Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise für den sicheren Gebrauch

Jedes Viberec Pro Gerät ist nur für die Verwendung durch eine Person bestimmt. Es sollte niemals mit einer anderen Person geteilt werden, da dies das Risiko von ansteckenden oder sexuell übertragbaren Krankheiten erhöht. Behandeln Sie Ihr Gerät wie eine persönliche Zahnbürste oder andere persönliche Hygieneprodukte.

Dieses Gerät sollte nicht auf geschwollenen oder entzündeten Stellen oder Hautausschlägen verwendet werden. Verwenden Sie es nicht bei unerklärlichen Wadenschmerzen. Konsultieren Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt.

Dieses Gerät sollte nicht länger als 10 Minuten pro Tag verwendet werden, um Hautverletzungen zu vermeiden. Eine übermäßige Vibrationsstimulation kann das Risiko von Hautreizungen und vorübergehender Taubheit erhöhen.



Wenn der Benutzer eine Rückenmarksverletzung hat, kann es infolge der Vibrationsstimulation zu einer autonomen Dysreflexie kommen. In diesem Fall sollte die Vibration sofort eingestellt werden. Konsultieren Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt. Autonome Dysreflexie (Blutdruckanstieg, Schweißausbrüche, Kopfschmerzen) kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, z. B. durch einen überdehnten Darm oder eine überdehnte Harnblase. Verfahren, die einen Orgasmus auslösen oder Vibrationsstimulationen beinhalten, können eine akute Episode der autonomen Dysreflexie auslösen.

Wenn der Benutzer nach der Verwendung des Viberec Pro Geräts eine Peniserektion entwickelt, die länger als vier Stunden anhält, sollten Sie sofort Ihre Ärztin/Ihren Arzt aufsuchen oder sich in die Notaufnahme begeben, da der Benutzer möglicherweise Priapismus entwickelt hat, der einen medizinischen Notfall darstellt. Priapismus ist ein medizinischer Zustand, bei dem sauerstoffarme rote Blutkörperchen in Ihrem Penis eingeschlossen werden. Dies erfordert eine dringende medizinische oder chirurgische Behandlung.

Vermeiden Sie die Verwendung von Viberec Pro bei Temperaturen von über 35°C.



Die Vibrationsstimulation kann oberflächliche Verletzungen der Haut verursachen, die zu Blutergüssen, Blutungen oder oberflächlichen Geschwüren führen können. Wenn ein solcher Zustand auftritt, unterlassen Sie das Vibrieren und konsultieren Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt.

Tauchen Sie den Vibrator nicht in Flüssigkeiten aller Art ein. Betreiben Sie den Vibrator nicht in Badezimmern oder unter anderen nassen Bedingungen.

Vibrect pro

6. Betriebsanleitung

Beachten Sie: Jedes Vibrect Pro Gerät ist nur für die Verwendung durch eine Person bestimmt. Es sollte niemals mit einer anderen Person geteilt werden, da dies das Risiko von ansteckenden oder sexuell übertragbaren Krankheiten erhöht. Behandeln Sie Ihr Gerät wie eine persönliche Zahnbürste oder andere persönliche Hygieneprodukte.

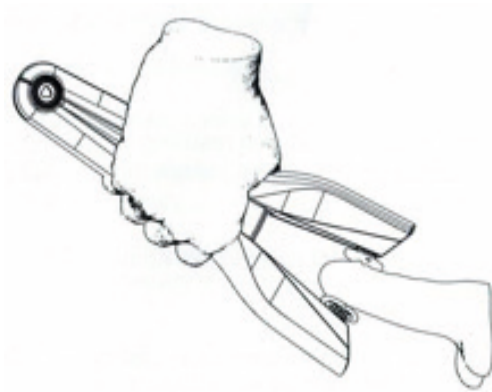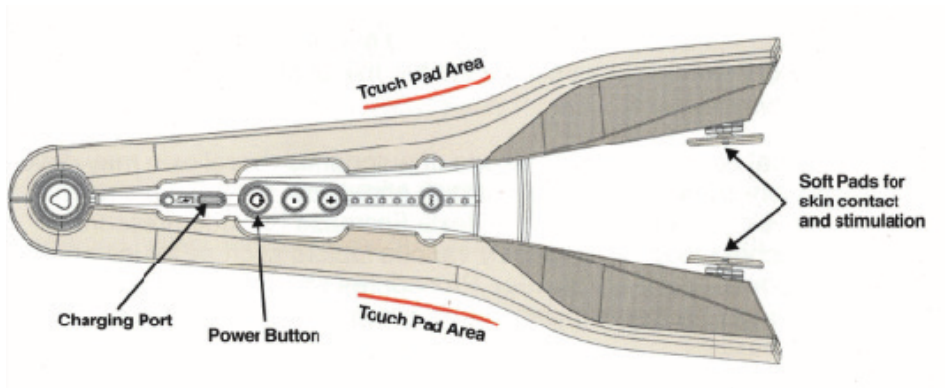

Zubehör und abnehmbare Teile

1. Die Soft Pads (im Lieferumfang enthalten) sind abnehmbar und austauschbar. Ersatz-Soft Pads können Sie hier bestellen: order@medesign.de
2. USB-Ladekabel (im Lieferumfang enthalten). Wandladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Viberect pro

Touch Pad

1 EIN/AUS Taste auf dem Touch Pad

Das Gerät kann durch Drücken der Taste auf dem Touch Pad ein- und ausgeschaltet werden. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

2 Frequenzkontrolle

Diese Einstellungen sollten nur vorgenommen werden, wenn das Gerät geöffnet ist. Durch Drücken der Tasten + oder – auf dem Touch Pad wird die Frequenz von 70 Hz bis zu einem Maximum von 110 Hz nach Wunsch erhöht. Die LED-Leuchten erhöhen sich in 10-Hz-Schritten, was an den weißen LED-Leuchten zu erkennen ist, die sich nach und nach von unten nach oben einschalten.

3 Ladeanzeige

Wenn das Gerät zum Laden eingesteckt und ausgeschaltet ist, leuchtet nur die Ladestatusanzeige. Diese Leuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot und wird grün, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, während es eingesteckt ist, beginnen die Frequenzanzeigeleuchten nacheinander zu leuchten. Dies zeigt an, dass das Gerät gerade aufgeladen wird. Das Gerät kann nicht benutzt werden, während es zum Aufladen eingesteckt ist.

Wenn das USB-Kabel entfernt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

4 PAD-Modus-Taste und Anzeige

Diese Einstellungen sollten vorgenommen werden, wenn das Gerät geöffnet ist.


Das Gerät kann in 3 Betriebsarten betrieben werden:

- Obere Vibration
- Untere Vibration
- Beide Vibrationen – (empfohlen für maximale sexuelle Stimulation)

Die Modi können durch ein-, zwei- oder dreimaliges Drücken der PAD-Taste ausgewählt werden, während sich das Gerät in der offenen Position befindet.

5 Ladeanschluss (USB-C)

Die Ladebuchse befindet sich unterhalb der Einschalttaste.

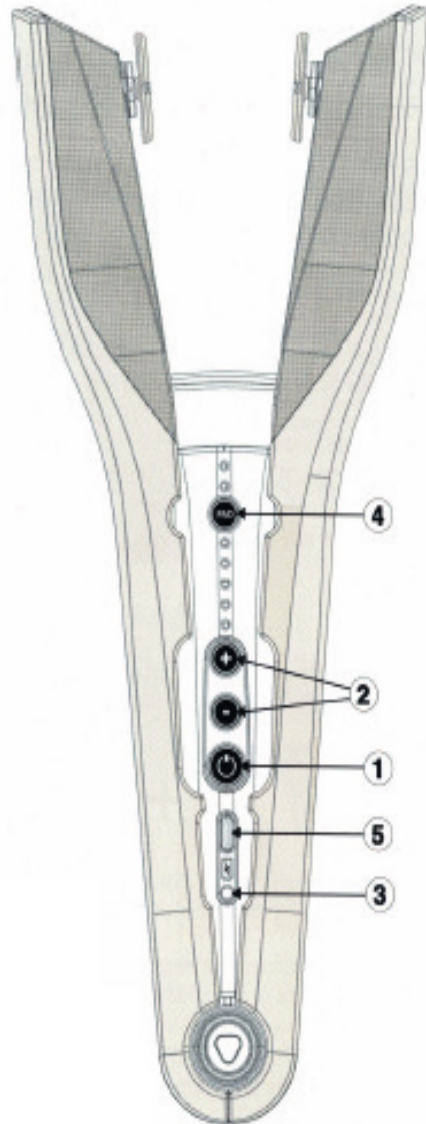

Viberec pro

7. Anleitung zum Herbeiführen einer Peniserektion

Ungefähre Stimulationsdauer: 3-10 Minuten

Um eine sexuelle Stimulation zu erzielen, ist es wichtig, dass Sie die folgenden Gebrauchsanweisungen befolgen. Es kann mehrere Sitzungen/Anwendungen erfordern, bis Sie lernen, wie Sie Ihr Viberec Pro Gerät richtig benutzen, um optimale Lust zu erzielen.

Schritt 1: Legen Sie Ihren Penis mit heruntergelassener Hose frei, um zu verhindern, dass der Blutfluss durch Ihre Unterwäsche behindert wird. Wenn Sie unbeschnitten sind, ziehen Sie Ihre Vorhaut zurück, um die Spitze Ihres Penis freizulegen.

Schritt 2: Um den Penis auf die Vibrationsstimulation vorzubereiten ist es notwendig, die Nervenenden freizulegen, die sich auf der Oberfläche des Penis befinden, vor allem an der Eichel des Penis.

Schritt 3: Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Einschalttaste ein. Das Gerät ist bereit, aber es treten keine Vibrationen auf, bis Sie die beiden Gehäuse mit dem Handgriff zusammenführen. Starten Sie mit einer Frequenz von 70-80 Hz, um eine Erektion zu provozieren.

Schritt 4: Halten Sie Ihren Penis während der Stimulation durch das Gerät sanft gedehnt. Üben Sie Druck auf beide Arme aus, indem Sie den Handgriff am Gerät festziehen. Das Gerät wird aktiviert.

Schritt 5: Bringen Sie die vibrierenden Pads auf beiden Seiten in Kontakt mit der Oberfläche Ihres gestreckten Penis. Konzentrieren Sie sich auf die Spitze des Penis. Halten Sie Ihren Penis leicht gedehnt. Das Viberec Pro Gerät stimuliert nun Ihren Penis. Sie können den Druck und das Gefühl erhöhen, indem Sie Ihre Hand und Ihren Griff näher an das vibrierende Ende des Geräts bringen. Sie sollten einen „Sweet Spot“ an Ihrem Penis finden, an dem die Empfindungen am stärksten sind. Setzen Sie den Viberec Pro an dieser Stelle an. **Hinweis:** Der Benutzer sollte das Gerät niemals mit übermäßiger Kraft zusammenpressen, da dies den Penis verletzen oder das Gerät beschädigen kann. Sie können Ihre Hüfte während der Stimulation hin- und herbewegen, um den Geschlechtsverkehr zu imitieren.

Schritt 6: Während Sie die Oberfläche des Penis stimulieren, können Sie die Intensität der Stimulation erhöhen, indem Sie mit dem Daumen, der das obere Gehäuse hält, auf die Tasten zur Frequenzeinstellung drücken. Beginnen Sie mit der niedrigsten Frequenz. Sie können den Modus auch ändern in: A – nur oben; B – nur unten oder C- beides.

Schritt 7: Wenn die Empfindungen zu intensiv sind oder Sie das Gerät sofort stoppen möchten, können Sie einfach Ihren Griff entspannen und das Gerät wird sofort stoppen. Sie können die Intensität der Stimulation auch durch Verringern der Frequenz herabsetzen.

Schritt 8: Stimulieren Sie weiterhin den Schaft und die Eichel des Penis. Konzentrieren Sie sich vor allem auf die Eichel des Penis. Wenn Sie eine besonders empfindliche Stelle spüren, halten Sie das Gerät dort etwa 3-10 Minuten lang. Es ist wichtig, dass Sie sich völlig entspannen und sich auf Gedanken sexueller Natur konzentrieren. Sexuelle Reflexe und Bahnen funktionieren am besten in einer entspannten Umgebung. Der Vorgang dauert einige Minuten und erfolgt nicht sofort! Sie können spüren, wie sich Ihr Penis langsam mit Blut füllt und fester wird.


Schritt 9: Sie können das Gerät ganz einfach deaktivieren, indem Sie es ausschalten oder einfach die Hand loslassen bzw. den Druck der Hand auf das Gerät verringern. Drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang und das Gerät schaltet sich aus.

Sobald Sie die optimale Steifigkeit erreicht haben, lassen Sie den Griff los und legen Sie das Gerät ab. Sie können mit dem Geschlechtsverkehr beginnen, wenn Ihre Steifigkeit zufriedenstellend ist. Hinweis: Nicht alle Männer reagieren anfangs auf die Stimulation mit dem Viberec Pro. Es kann mehrere Sitzungen/Anwendungen dauern, bis Sie sich mit der Bedienung des Geräts vertraut gemacht haben.

Viberec pro

8. Abnehmen und Austauschen der Viberec Pro Soft Pads

Wenn die Viberec Pro Soft Pads Anzeichen von Abnutzung und/oder Verschlechterung aufweisen, müssen sie sofort ausgetauscht werden. Überprüfen Sie zuerst die Oberfläche der Polsterumhüllung auf Anzeichen von Abnutzung und ersetzen Sie sie bei Bedarf; überprüfen Sie dann die Unversehrtheit der Polster-Umhüllungseinheit. Ziehen Sie einfach jedes Pad in die Richtung, die direkt vom Gehäuse des Geräts wegführt (siehe Abbildung). Setzen Sie neue Pads ein, indem Sie sie einfach in die Padbefestigung einrasten lassen. Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät in der AUS-Position befindet, wenn Sie die Pads austauschen. Entsorgen Sie die alten Pads in einem geschlossenen Abfallbehälter.

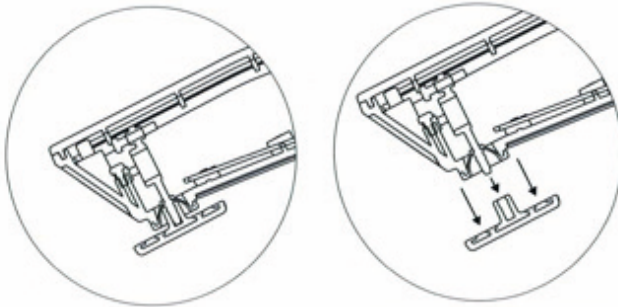

9. Reinigung

Um sicherzustellen, dass Ihr Viberec Pro Gerät immer einsatzbereit ist, wird empfohlen, nach jedem Gebrauch die beiden Vibrationskissen und die gesamte Oberfläche zu reinigen und den Akku wieder aufzuladen.

Wischen Sie die Außenseite des Vibrators mit einem trockenen oder mit Alkohol angefeuchteten Tuch ab. Tauchen Sie den Vibrator nicht in irgendwelche Flüssigkeiten ein.

Es ist wichtig, dass Sie die Pads und den Körper des Geräts nach jedem Gebrauch mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen und mit Alkoholtüchern nachreinigen.

Viberec pro

10. Angaben zur elektromagnetischen Emission

Leitfaden und Herstellererklärung – Elektromagnetische Strahlung		
Das Viberec Pro Gerät ist für die Verwendung in den unten angegebenen elektromagnetischen Bereichen bestimmt. Der Kunde oder Benutzer des Viberec Pro Geräts sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.		
Emissionsprüfung	Einhaltung	Elektromagnetische Umgebung
RF-Emissionen CISPR 11	Gruppe 1	Das Viberec Pro Gerät verwendet RF-Energie nur für seine interne Funktion. Daher sind seine RF-Emissionen sehr gering und verursachen wahrscheinlich keine Störungen bei elektronischen Geräten in der Nähe.
RF-Emissionen CISPR 11	Klasse B	Das Viberec Pro Gerät eignet sich für den Einsatz in allen Einrichtungen, einschließlich Wohngebäuden und solchen, die direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das Gebäude für Wohnzwecke versorgt.
Harmonie-Emissionen IEC 6100-3-2	Klasse B	
Spannungsschwankungen/Flicker-Emissionen	entspricht	

Leitfaden und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit			
Das Gerät ist für die Verwendung in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder Benutzer des Viberec Pro Geräts sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.			
Prüfung der Immunität	Teststufe	Konformitätsstufe	Elektromagnetische Umgebung - Leitfaden
Elektrostatische Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	± 6kV Kontakt ± 8 kV Luft	erfüllt	Die Böden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Bei Böden aus synthetischen Material sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30% betragen.
Gestrahlte RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz bis 2,5 GHz	erfüllt	Feldstärken außerhalb des abgeschirmten Standorts von ortsfesten HF-Sendern, die durch eine elektromagnetische Standortbestimmung ermittelt wurden, sollten weniger als 3V/m betragen. In der Nähe von Geräten, die mit folgendem Symbol gekennzeichnet sind können Störungen auftreten:
Leitungsgebundene RF IEC 61000-4-6	3 V RMS 150 kHz bis 80 MHz	erfüllt	

Viberec pro

			
Schnelle elektrische Transienten IEC 61000-4-4	± 2 kV Stromleitung ± 1 kV I/O Leitungen	erfüllt	Die Qualität der Netzspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Überspannung IEC 61000-4-5	± 1 kV differentiell ± 2 kV gemeinsam	erfüllt	
Netzfrequenz Magnetfeld IEC 61000-4-8	3 A/m	erfüllt	Leistungsfrequente Magnetfelder sollten die für einen typischen Standort in einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung charakteristischen Werte aufweisen.
Spannungseinbrüche Kurzunterbrechungen und Spannungsschwankungen auf Stromversorgungseingangsleitungen IEC 61000-4-11	> 95 % Einbruch 0,5 Zyklen 60 % Einbruch 5 Zyklen 70 % Einbruch 25 Zyklen 95 % Einbruch 5 Sek.	erfüllt	Die Qualität der Netzstromversorgung sollte einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. Wenn der Benutzer des Viberec Pro Geräts den Betrieb auch bei Unterbrechungen der Netzstromversorgung fortsetzen muss, wird empfohlen, das Viberec Pro Gerät über einer unterbrechungsfreie Stromversorgung oder eine Batterie zu betreiben.

11. Produktspezifikationen

Netzkabel: Standard USB Typ C.

Frequenzbereich (mit vollständig geladenem Akku): 70-110 Hz.

Amplitude (Konstante): 3.8 mm.

Batterie: Lithium-Ionen Akku.

Anwendungstemperatur: Vermeiden Sie die Verwendung von Viberec Pro bei Temperaturen von über 35°C.

Lagerung: Umgebungstemperatur 20-25°C.

Viberec pro

12. Kontaktinformation



medesign I. C. GmbH, Dietramszeller Straße 6, D-83623 Dietramszell.

Tel: +49 (0)8027 907380

info@medesign.de

www.medesign.de



Urology Health Store, Reflexonic LLC., 44055 Riverside Pkwy Suite 208, Leesburg VA 20176.

13. Symbollegende



Achtung



Hersteller



Importeur



Zerbrechlich, mit Sorgfalt handhaben



Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist

14. Häufig gestellte Fragen

Frage: Kann ich bei der Verwendung meines Viberec Pro Geräts ein Gleitmittel verwenden?

Antwort: Ja, achten Sie bitte darauf, dass es ein Gleitmittel auf Wasserbasis ist (wie z. B. das medesign Endurance Gleitgel oder das medesign m-lys Gleitgel).

Frage: Wie unterscheidet sich der Viberec Pro von anderen Vibrationsgeräten auf dem Markt?

Antwort: Es stimuliert gleichzeitig die Ober- und Unterseite des Penis, um die Stabilität und Reaktion zu verbessern.

Frage: Ich habe ein Penisimplantat. Kann ich den Viberec Pro verwenden?

Antwort: Ja, das Gerät kann verwendet werden, um einen Orgasmus herbeizuführen.

Frage: Muss ich die Pads auf der Penisspitze belassen oder kann ich das Gerät umherbewegen?

Antwort: Sie können das Viberec Pro Gerät überall auf dem Penis bewegen, um Lust zu empfinden. Die meisten Nervenenden befinden sich aber an der Spitze des Penis.

medesign I.C. GmbH · Dietramszeller Str. 6 · D-83623 Dietramszell
www.medesign.de · info@medesign.de