

	Artikel Nr.	Artikelbezeichnung	Größe	EAN/ <u>UDI-DI</u>
REF	MED1001245	waxo Therm Wärmepack	50 × 30 cm	4250201202673
REF	MED1001244	waxo Therm Wärmepack	70 × 50 cm	4250201202680

Pflichttext entsprechend der Vorgabe nach Verordnung (EU) 2017/745 MDR

Bei Fragen und Problemen im Zusammenhang mit dem Waxo Therm Wärmekissen sowie bei schweren Komplikationen, die auf das waxo Therm Wärmekissen zurückzuführen sind, wenden Sie sich an den Hersteller medesign I.C. GmbH, info@medesign.de oder Tel.: +49(0) 8027 907380. Melden Sie uns bitte umgehend, falls im Zusammenhang mit dem Produkt ein schwerwiegendes Vorkommnis eingetreten ist, das direkt oder indirekt eine der nachstehenden Folgen hatte, hätte haben können oder haben könnte:

- den Tod des Patienten, Anwenders oder einer anderen Person,
- die vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen,
- eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit.

Im Falle eines schwerwiegenden Vorkommnisses können Sie sich auch an die zuständige Behörde Ihres Landes wenden.

Symbols

REF Artikelnummer

LOT Chargennummer

 Hersteller

 Gebrauchsanweisung beachten

 Vor Sonnenlicht schützen

 Temperaturgrenzwerte

MD Medizinprodukt

UDI Eindeutige Produktidentifizierung

SRN Single Registration Number

 Verwendbar bis

Hersteller / Manufacturer:
medesign I.C. GmbH

LOT 704172

SP00649.005

PRN21102


waxo Therm Wärmekissen

sauber + ökonomisch

Gebrauchsanleitung



Made in Germany

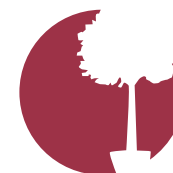

MEDESIGN

 medesign I.C. GmbH · Dietramszeller Str. 6 · D-83623 Dietramszell
www.medesign.de · info@medesign.de

Gebrauchsinformation

medesign waxo Therm Wärmekissen werden als Wärmepackung zur Applikation intensiver Wärme in der Wärmetherapie angewendet.

Anwendung/Anleitung nur durch geschultes Fachpersonal empfohlen (z.B. Physiotherapeut). waxo Therm wird im Wärmeschrank bei 70 °C erwärmt. Nach Herausnahme ca. 5 Minuten abkühlen lassen, um vor der Behandlung die Temperatur auf ein verträgliches Maß zu bringen.

Sicherheitshinweise

- Nicht über 70 °C erwärmen. Nylonhülle kann beschädigt werden.
- Verbrennungsgefahr! Bei Entnahme des Produkts aus dem Wärmeschrank Hitzeschutzmaßnahmen ergreifen.
- Je nach Wärmeempfinden des Patienten direkten Körperkontakt vermeiden z.B. durch Verwendung von Frottee-Tüchern.
- Die Wärmebehandlung sollte 25 – 30 Minuten nicht überschreiten.
- Zur gleichmäßigen Verteilung des Wärmepulvers sollte das Produkt regelmäßig leicht geschüttelt werden.
- Das Produkt darf nicht für Ganzkörperpackungen verwendet werden.
- Bei sichtbaren Beschädigungen nicht mehr verwenden.
- Bei unsachgemäßer Verwendung/Handhabung lassen sich gesundheitliche Schäden nicht ausschließen. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko.
- Das Produkt ist kein Spielzeug und muss bei Nichtbenutzung für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden. Strangulationsgefahr! Sollten Sie Kindern die Benutzung erlauben, weisen Sie diese auf den richtigen Gebrauch hin und behalten Sie die Aufsicht. Erlauben Sie die Benutzung nur, wenn die geistige und körperliche Entwicklung der Kinder dies zulässt. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Bei der Entsorgung sind regionale Vorschriften zu beachten.

Indikationen

Wärme wird bei **chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparats (etwa bei Arthrose), bei muskulären Verspannungen, Rückenproblemen und bei psychosomatischen Beschwerden** angewendet. Auch bei beginnenden Infekten kann Wärme unterstützend wirken.

Wärme entfaltet ihre Wirkung im Sinne einer Durchblutungs- beziehungsweise Stoffwechselsteigerung. Die Wärmetherapie fördert die Durchblutung und wirkt entspannend und somit schmerzlindernd auf Muskulatur und Gewebe, Sie wirkt muskelentspannend und kann die Elastizität von bindegewebigen Strukturen verbessern. Nicht zu unterschätzen ist bei der Anwendung von Wärme auch die erholsame Wirkung.

Kontraindikationen:

Herz-Kreislauf-Probleme, Fieber, Verletzungen an der zu behandelnden Stelle, Diabetes, Rheumatoide Arthritis und Schwangerschaft sprechen meist gegen eine Wärmetherapie. Generell sollte **keine** Wärme **angewendet** werden bei: Akuten entzündlichen Prozessen (zum Beispiel grippaler Infekt, akuter Schub einer Gelenkentzündung), stark eingeschränkter Herzleistung, belastungsabhängigen Herzrhythmusstörungen.

Mögliche Nebenwirkungen der Wärmetherapie

Verbrennungen bei einer zu heißen Behandlung die nicht rechtzeitig erkannt werden. Bei manchen Personen können während einer Wärmebehandlung auch Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Schwindel oder Übelkeit auftreten.

Aufwärmzeiten

Bei einem voll belegten Wärmeschrank werden bis zum Erreichen der Applikationstemperatur etwa 4 Stunden benötigt. Nach einer Behandlung dauert es ca. 30 Minuten, bis das noch warme Produkt im Wärmeschrank wieder die gewünschte Temperatur von 70 °C erreicht hat. Um eine gleichmäßige Behandlungsqualität zu gewährleisten, empfehlen wir für die waxo Therm Wärmepackung eine Nutzungsdauer von maximal zwei Jahren.

Pflege

Das Produkt kann mit Flächendesinfektionsmitteln auf Wasserbasis desinfiziert werden. Verschmutzungen können mit Wasser und Flüssigseife entfernt werden. Keine scharfen Gegenstände verwenden.

Lagerung

Kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen.

Haftungsausschluss

Bei Zweckentfremdung oder falscher Handhabung kann vom Hersteller keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.