

waxo Therm Wärmekissen

sauber + ökonomisch

Gebrauchsanleitung

CE

Made in Germany



MEDESIGN

Gebrauchsinformation

waxo Therm Wärmekissen werden als Wärmepackung zur Applikation intensiver Wärme in der Wärmetherapie angewendet.

Anwendung nur durch geschultes Fachpersonal empfohlen (z.B. Physiotherapeut). waxo Therm wird im Wärmeschrank bei 70 °C erwärmt. Nach Herausnahme ca. 5 Minuten abkühlen lassen, um vor der Behandlung die Temperatur auf ein verträgliches Maß zu bringen.

Sicherheitshinweise

- Nicht über 70 °C erwärmen.
- Verbrennungsgefahr! Bei Entnahme des Produkts aus dem Wärmeschrank Hitzeschutzmaßnahmen ergreifen.
- Je nach Wärmeempfinden des Patienten direkten Körperkontakt vermeiden z.B. durch Verwendung von einem Frottee-Tuch.
- Die Wärmebehandlung sollte 25 – 30 Minuten nicht überschreiten.
- Zur gleichmäßigen Verteilung des Wärmepulvers sollte das Produkt regelmäßig leicht geschüttelt werden.
- Das Produkt darf nicht für Ganzkörperpackungen verwendet werden.
- Bei sichtbaren Beschädigungen nicht mehr verwenden.
- Bei unsachgemäßer Verwendung/Handhabung lassen sich gesundheitliche Schäden nicht ausschließen. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko.
- Das Produkt ist kein Spielzeug und muss bei Nichtbenutzung für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden. Strangulationsgefahr! Sollten Sie Kindern die Benutzung erlauben, weisen Sie diese auf den richtigen Gebrauch hin und behalten Sie die Aufsicht. Erlauben Sie die Benutzung nur, wenn die geistige und körperliche Entwicklung der Kinder dies zulässt. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Bei der Entsorgung sind regionale Vorschriften zu beachten.
- Sollten im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese dem Hersteller zu melden.

Aufwärmzeiten

Bei einem voll belegten Wärmeschrank werden bis zum Erreichen der Applikationstemperatur etwa 4 Stunden benötigt.

Nach einer Behandlung dauert es ca. 30 Minuten, bis das noch warme Produkt im Wärmeschrank wieder die gewünschte Temperatur von 70 °C erreicht hat.

Um eine gleichmäßige Behandlungsqualität zu gewährleisten, empfehlen wir für die waxo Therm Wärmepackung eine Nutzungsdauer von maximal zwei Jahren.

Pflege

Das Produkt kann mit Flächendesinfektionsmitteln auf Wasserbasis desinfiziert werden.

Lagerung

Kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen.

Haftungsausschluss

Bei Zweckentfremdung oder falscher Handhabung kann vom Hersteller keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

Artikel Nr.	Artikelbezeichnung	Größe	EAN
MED1001245	waxo Therm Wärmepack	50 × 30 cm	4250201202673
MED1001244	waxo Therm Wärmepack	70 × 50 cm	4250201202680

 Hersteller / Manufacturer:
medesign I.C. GmbH

 696797
2026-06

SP00649.003
09.08.2021

PRN21102