

# Windeleinlage

## Bouretteseide

16 cm × 45 cm

### Anwendung

Auch bei hautfreundlichen Wickelsystemen kann es vorkommen, dass Ihr Baby wund wird, z.B. durch Nahrungsumstellung. Legen Sie die Bouretteseideneinlage in die Windel.



**Die Windeleinlage legen Sie direkt ohne Creme auf die Haut des Babys.**

Hier entwickelt die Seide ihre natürlich lindernde Wirkung.



**Einlage mindestens alle 3 Stunden wechseln bis die Entzündung abgeklungen ist.**

Fönen Sie vorsichtig den wundten Po und lassen Ihr Baby auch mal ohne Windel liegen, damit vermehrt Luft an die Haut kommt.

**Material:** 100% Seide

### Pflege

30 °C Handwäsche mit einem Wollshampoo. Nicht schleudern.

REF MED1001100  
LOT xxxxxxx  
20xx-xx



Made in Germany

**M E D E S I G N**  
Dietramszell · Dubai · München

ET120929 SP02283.xxx LOT xxxxxx 20xxxx

