

MUNDKEIL

Keilförmig soft transparent

90 x 35 mm

Der medesign Mundkeil ermöglicht verlässlich das Offenhalten des Mundes bei krampfenden Patienten (z. B. bei künstlicher Beatmung oder epileptischen Anfällen). Er verhindert wirkungsvoll das Zubeißen der Kiefer und damit verbundene Verletzungen an Mundhöhle und Zähnen.

Anwendung: Der Mundkeil wird zwischen Ober- und Unterkiefer geschoben, bis der Kiefer weit genug geöffnet ist.

Reinigung: Mit Seifenlauge, Alkohol oder Wasser reinigen. medesign Mundkeile nur in gereinigtem Zustand verwenden, um Infektionen vorzubeugen.



Krampfende Patienten können Silikonteile herausbeißen und eventuell verschlucken oder einatmen. Vor Verwendung auf Unversehrtheit prüfen.

UDI



UDI-DI (01) 04250201206145

(17) 270430

LOT (10) 698042

Verpackung:



SRN DE-MF000020677



2027-04

PRN21321 SP02589.000 LOT 698581



REF MED1001087
LOT 698042
2027-04



MEDESIGN