

waxo Bienenwachswickel

Gebrauchsanweisung

Informationen

Wärmetherapie mit dem waxo Bienenwachs-Pack. Wärme ist die Grundlage menschlichen Lebens. In der Therapie kann sie Erstarrungen lösen und Schmerzen lindern, den Zugang zu Menschen erleichtern, die Wirksamkeit einer Therapie begünstigen und vertiefen.

Die Wärmetherapie mit dem waxo Bienenwachs-Pack wird zur Wiederherstellung und Harmonisierung der Wärmeverhältnisse im menschlichen Körper angewendet. Der Bienenwachs-Pack ist sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet.

Im Wellnessbereich führt die ausgeglichene Wärmeverteilung zu einer Harmonisierung und wohltuenden Entspannung.

Der waxo Bienenwachs-Pack besteht aus reiner Seide die gleichmäßig mit reinem Bienenwachs. Es enthält keine Farb- oder Konservierungsstoffe, Paraffin oder Stearin.

Anwendungsgebiete Indikation

Das Einsatzgebiet der Bienenwachs-Wärmetherapie umfasst die gesamte Physiotherapie im Klinik- und Pflegebereich, sowie die Anwendung im Wellness- und privaten Bereich.

Zweckbestimmung

Wärmetherapie

Vorteile

- einfache, hygienische Anwendung
- ansteigende, konstante Anwendungstemperatur, dadurch minimale Belastung des Patienten
- natürliche, angenehme Materialien
- vielfältige Einsatzbereiche in Therapie und Wellness

Nicht verwenden bei/ Kontraindikation



bekannter Allergie gegen Bienenprodukte, großflächigen Hautverletzungen, offenen Wunden und akuten Hauterkrankungen, Durchblutungsstörungen, fieberhaften Erkrankungen, akuten Zuständen nach Traumata, akuten Entzündungen, Wärmeurtikaria, Hypertonie, rheumatischen Schüben, Herz-Kreislaufinsuffizienzen.

Eine Anwendung in der Schwangerschaft ist mit Hebamme oder Arzt zu besprechen.



MEDESIGN

Anwendung

Der waxo Bienenwachs-Pack führt in sanfter Weise zu ausgeglichener, tiefer Durchwärmung des ganzen Körpers und bewirkt dadurch Entspannung, Beruhigung und fördert die Selbstregulation.

Der Bienenwachs-Pack wird folgendermaßen aufgebaut:

- waxo Bienenwachs-Pack
- Frottee-Handtuch in entsprechender Größe
- Wärmeträger (z.B. Kirschkernkissen, Traubenkernkissen, Quarzmineralsäckchen)

waxo Bienenwachs-Pack auf den zu behandelnden Körperbereich legen und der Körperkontur anschmiegen. Frottee-Handtuch zwei- bzw. dreilagig über den Bienenwachs-Pack legen, sodass der gesamte Bereich abgedeckt ist. Den Wärmeträger für den Patienten angemessen temperieren und auf das Frottee-Handtuch legen. Der Wärmeträger sollte bei Erwachsenen max. 60 – 70 °C heiß sein, bei Kindern max. 45 – 50 °C. Für Babys ist die Anwendung nicht geeignet.

Patient mit geeigneten Decken warm und bequem einpacken. Dauer der Anwendung ca. 20 – 30 Minuten.

Eine angemessene Nachruhe fördert das Wohlbefinden.

Wärmeträger

Als Wärmeträger können Kirschkernkissen, Traubenkernkissen oder Quarzmineralsäckchen verwendet werden. Je nach Art des Wärmeträgers kann er entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung bis auf ca. 60 °C erwärmt werden. Zwischen Wärmeträger und Bienenwachsfolie sollte immer ein mindestens zweilagiges Pufferhandtuch liegen. Eine Handtuchlage kann auch durch Heilwolle ersetzt werden.

Hinweise

Den heißen Wärmeträger niemals direkt auf die Haut legen, es können Hautschädigungen auftreten. Immer ein Frottee-Handtuch als Puffer verwenden. Den heißen Wärmeträger niemals direkt auf den Bienenwachs-Pack legen, das Wachs würde schmelzen und es können Hautschädigungen auftreten. Der waxo Bienenwachs-Pack ist bei Temperaturen unter 20 °C brüchig und lässt sich der Körperkontur nicht richtig anpassen.

Nebenwirkungen

Nach großflächiger Wärmebehandlung besteht die Möglichkeit einer orthostatischen Dysregulation beim Aufstehen. In diesem Fall soll der Patient vor dem Aufstehen für einige Minuten aufrecht sitzen bleiben. Bei sehr empfindlichen Patienten ist eine übermäßige Rötung der Haut möglich.

Aufbewahrung

Der waxo Bienenwachs-Pack kann mehrmals bei dem selben Patienten verwendet werden. Abhängig von der Anwendungstemperatur kann der Pack bis zu sechsmal verwendet werden. Nach der Anwendung streichen Sie den waxo Bienenwachs-Pack glatt, rollen ihn in ein sauberes Handtuch ein, versehen es mit einem Namensschildchen und lagern es zweckmäßig. Nach der Anwendung kann der waxo Bienenwachs-Pack verblassen, dies ist ein natürlicher Vorgang.

Entsorgung

Über den Hausmüll

Produkte

Artikel Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Größe	EAN
MED1002428	waxo Bienenwachswickel Kleinkind UDI-DI: 04250201214416	10 Stk	21 × 14 cm	4250201214416
MED1001188	waxo Bienenwachswickel Kleinkind UDI-DI: 04250201202635	2 Stk	20 × 30 cm	4250201202635
MED1001516	waxo Bienenwachswickel Kleinkind UDI-DI: 04250201202642	10 Stk	20 × 30 cm	4250201202642

Made in Germany



Verwendbar bis



Chargenbezeichnung



Hersteller



Artikelnummer (MED..)



Gebrauchsanweisung beachten



Lagertemperatur von 0 °C bis 28 °C



CE-Zeichen



Vor Lichteinstrahlung schützen



Einmalige Produktkennung



EUDAMED Nummer



Medizinprodukt

SRN DE-MF000020677

Die Original waxo Bienenwachs-Packs werden in Handarbeit hergestellt.
Kleine Maß- und Farbabweichungen sind möglich.

medesign I.C. GmbH · Dietramszeller Straße 6 · D-83623 Dietramszell · info@medesign.de · www.medesign.de