


# Vaginal Gel-Applikator

Vaginal Applicator

Gebrauchsanweisung · Instructions for use


**M E D E S  G N**  
Dietramszell · Dubai · München

1

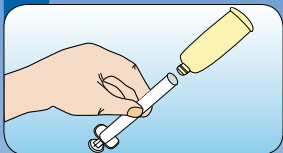


Entfernen Sie die Kappe der Salbentube und stecken Sie den Applikator auf/an die Tube.

2

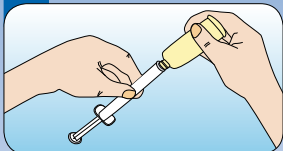


Drücken Sie den Inhalt der Tube vorsichtig und langsam in den Applikator, bis dieser komplett gefüllt ist. Entfernen Sie die Tube vom Applikator und verschließen Sie die Tube wieder.

3

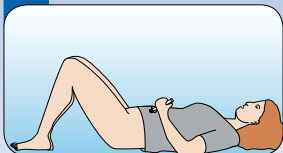


Legen Sie sich bequem mit angewinkelten, gespreizten Beinen auf den Rücken. Nehmen Sie dabei den gefüllten Applikator in eine Hand.

4

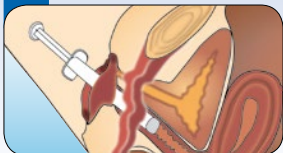

Führen Sie den Applikator so tief Sie können in Ihre Vagina ein (vergleichbar mit einem Tampon).


5

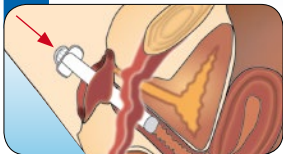

Drücken Sie den Applikator leer, um den Inhalt aus dem Zylinder in die Vagina zu befördern. Entfernen Sie den Applikator und reinigen Sie ihn.


1

Remove the cap from the tube and put the applicator onto the tube.

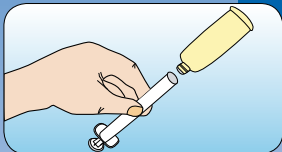


2

Squeeze the contents of the tube into the applicator until it's completely filled. Remove the tube from the applicator and put the cap back on the tube.

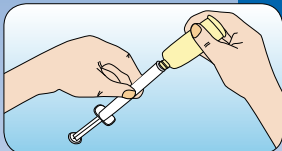


3

Lie down comfortably with your knees bent and spread apart. Hold the filled applicator in one hand.

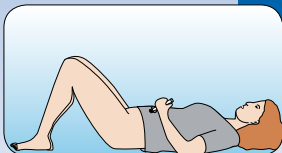


4

Put the applicator as far as you can into your vagina (like a tampon).

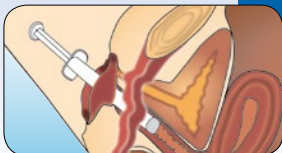

5

Slowly press the plunger to transfer the cream from the applicator to the vagina. Remove the applicator and clean it.

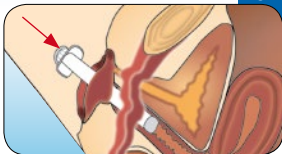

## Reinigung

Nach dem Benutzen können Sie den Applikator mit lauwarmem (nicht kochendem) Wasser und einer milden Seife reinigen. Zur Erleichterung der Reinigung zerlegen Sie den Applikator in Einzelteile. Dazu ziehen Sie den Stempel von dem Zylinder.

**Nur zum persönlichen Gebrauch!**

## Clean the applicator

After using the applicator, it should be cleaned with lukewarm water and a mild soap and rinsed thoroughly. The plunger can be separated from the external cylinder for easier cleaning.

**For personal use only!**

### Artikel Nr.

MED1000653

### Artikel

Vaginal Gel-Applikator

### EAN

4250201200044

### Item no.


MED1000653

### Item

Vaginal Applicator

### EAN

4250201200044

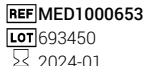

medesign I.C. GmbH · Dietramszeller Str. 6 · D-83623 Dietramszell

[www.medesign.de](http://www.medesign.de) · [info@medesign.de](mailto:info@medesign.de)

Hersteller / Manufacturer:  
medesign I.C. GmbH

Lot: xxx  
202xx-xx

SP00646.004  
29.07.2019

PRN21035