

Rettungsdecke

ca. 160 cm × 210 cm Gold-Silber

Hitze- und Kälteschutz

Kälteschutz: Die Decke mit der Silberseite zum Körper anlegen.

Hitzeschutz: Goldseite zum Körper, Decke lose überspannen.

Die Rettungsschutzdecke sollte immer nur lose umgelegt werden und nicht eng am Körper anliegen. So vermeiden Sie bei Hitze das Schwitzen und bei Kälte die bei direktem Hautkontakt mögliche Ableitung der körpereigenen Wärme. Die Rettungsdecke kann nötigenfalls mit Klebeband fixiert werden.



Achten Sie darauf, dass das Gesicht frei bleibt.

REF MED1000132
LOT 694011
2024-04
6M

CE

Verpackung:



M E D E S I G N
Dietramszell · Dubai · München

PRNZ1104 SP00658.005 Lot 694098 2024-04

